

FertilCount Spermietest

Så här använder du produkten:

Först samlar du ihop spermieprovet. Du kan samla ihop sperman genom att masturbera direkt i förvätskningskoppen som medföljer.

När du har samlat sperman i den medföljande plastkoppen, sätt på locket och virvla försiktigt runt vätskan minst 10 gånger runt om i koppen. Vänta minst 15 minuter, men inte längre än 12 timmar innan du testar provet.

Precis innan du påbörjar testningen, virvla runt innehållet i koppen flera gånger till. Öppna den återförslutningsbara påsen genom att dra upp eller klippa vid skårorna. Ta ut innehållet och placera testkassetten på en rak yta, med insamlingsbrunnarna placerade uppåt.

Virvla runt plastkoppen innan du tar av locket. Håll och pressa plastdropparen på mitten.

Placera den vinklade spetsen i spermieprovet och släpp trycket långsamt. När du gör detta, kommer plastdropparen suga upp spermieprovet.

Genom att varsamt pressa plastdropparen, addera en droppe sperma i testbrunnen (T), och låt det dra i minst 1 minut.

Addera TVÅ droppar av "BLUE"-lösningen i samma testbrunn (T), och låt dropparna dra i minst 1 minut.

Addera TVÅ droppar av "CLEAR"-lösningen i testbrunn (T). Låt dropparna dra i minst 1 minut.

Avläs resultaten inom 5 minuter efter dessa steg.

Så här läser du av resultaten:

Jämför färgintensiteten av testbrunn (T) och referensbrunnen (R)

POSITIVT TEST: Om färgen i testbrunn (T) är samma eller starkare än referensbrunn (R). Detta betyder att spermieantalet är lika med, eller fler än 15 miljoner per ml.

NEGATIVT TEST: Om färgstyrkan som syns i testbrunn (T) är mindre än färgen för testbrunn (R). Detta betyder att spermieantalet är lägre än 15 miljoner per ml.

Om du är osäker på resultatet av ditt test, ta ett andra test. Det andra testet bör inte göras inom 3 dagar efter det första testet, men inte heller längre än 7 dagar efter det första testet. Om båda testerna är positiva, så är ditt spermieantal högre än 15 miljoner per ml. Om ett av dina tester, eller båda är negativa, så rekommenderar vi att du konsulterar din läkare för att genomgå en full analys av din fertilitet.